



SUPPORTING
THE GAMES



バウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

バウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



バウアーファインド フェイスブックはこちら ▶

<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



コンフォートスポーツ 取扱説明書

パシフィックサプライのホームページで

製品レビュー

を書きませんか?

パシフィックサプライのホームページで、「製品レビュー」を書き込めます。

製品の満足度 5 段階評価を「★」で評価でき、ご使用した感想やご意見を書き込んでいただけます。

皆様の書き込みが製品購入の際の参考になります。

どなた様でも書き込みいただけますので、ご使用の製品のレビューを書き込んでください。

「コンフォートスポーツ」のページ
<http://www.p-supply.co.jp/products/>

 Pacific Supply
Think P^oSibility



パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。

コンフォートスポーツ BAUERFEIND®



- 注意**
- 必ず両足揃えた状態でご使用ください。
 - 左右の足のサイズが異なる場合は、サイズの大きい方をお選びください。
 - 足の赤みや圧迫などの変化が無いが、フィッティング状態を定期的にチェックすることをお勧めします。

コンフォートスポーツはウォーキングからスポーツまで幅広く適応したインソールです。


- 特殊技術による的確な方向指示、サポート、衝撃吸収
- 適度なアーチサポートによりフィット感が高まります。
- 表面カバーには除菌銀イオンが含まれています。

主な適応

足の変形（扁平足、外反扁平足など）
痛みの緩和、動作のサポート

コンフォートスポーツの装着方法

- 図1** インソールの着脱に十分なスペースがあるか確認してください。また、靴に付属のインソールは抜いてください。
- 図2** インソールの上に足を置き、つま先との間に最低1cmの隙間があるか確認してください。
- 図3** 前足部(C¹)、中足部(C²)、後足部(C³)が均等に支えられるようにし、インソールの端に足がかからないか確認してください。
- 図4** インソールを靴底へしっかり挿入してください。

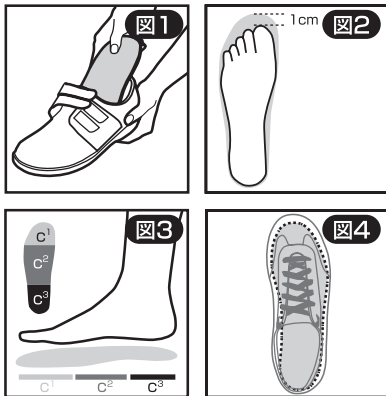

お手入れの方法



注意

- 使用後は必ず取り外し、湿気を外に逃がすようお手入れをお願いします。
- 洗濯機はご使用いただけません。
- 表面カバー部分は液体洗剤を付けたスポンジで汚れをふき取ってください。液体洗剤が残らないように、完全にふき取ってください。放熱器、ヘアドライヤーや直射日光に当たらないよう、製品を乾かしてください。



手洗い



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング




×乾燥機

サイズ (cm)

EU	35	36	37	38	39
足長実寸サイズ (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0
EU	40	41	42	43	44
足長実寸サイズ (cm)	24.5-26.0	25.5-26.5	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5
EU	45	46	47	48	
足長実寸サイズ (cm)	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0	

左右一組

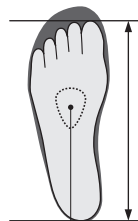

メタパッド

- ※必ずかかとを合わせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください。
- ※メタパッドの位置を必ずお確かめください。
- ※本製品は改良のため、予告なく変更を行う場合があります。
- ※廃棄については各自自治体の指示に従ってください。
- ※製品の保証期間は通常使用の範囲の場合、弊社出荷日より1年です。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)